



FACE SHIELD

mVISOR7001

Technische Informationen und Eigenschaften



TECHNISCHE INFORMATIONEN UND EIGENSCHAFTEN: mVISOR 7001

Anwendung

mVISOR 7001 ist ein Gesichtvisier, das als Schutz gegen Tropfen und Spritzer von Flüssigkeiten zugelassen ist. Das Visier dient der Anwendung in Umgebungen, in denen der Anwender Flüssigkeitsspritzern und/oder Tröpfcheninfektion ausgesetzt ist.

Das Produkt darf nur gemäß Bedienungsanleitung angewendet werden.

- Ganz deckender Schutz für das Gesicht vor Flüssigkeitsspritzern und Tröpfcheninfektion
- Einwandfreie Sicht durch das klare, transparente, beschlagfreie Visier
- Bequem durch die Schaumgummi-Polsterung und das individuell einstellbare Kopfband
- Geringes Gewicht: < 200 g

Produktbeschreibung

Produktname: mVisor 7001

Produktbeschreibung: Gesichtvisier

Kennzeichnung

Visier: Marka Pac 1 S

Kopfband: Marka Pac EN 166 3 S

Die EG-Konformitätserklärung kann hier heruntergeladen werden: mshield.se/docs

Hergestellt gemäß Anforderung

Vorschrift (EU) 2016/425

CE EN 166:2001 

No. 20/3121/00/0161 (AITEX)

Plaza Emilio Sala No. 1

Alcoi, Spanien, Benannte Stelle 0161

Technische Informationen und Eigenschaften

Scheibe	Verstellbares Kopfband	Schaumgummi
Dicke: 1,8 mm	Dicke: 1,2 mm	Dicke: 30 mm
Länge: 219 mm	Breite: 25 mm	Breite: 30 mm
Gewicht: 146 g	Gewicht: 24,2 g	Länge: 200 – 330 mm
Material: Polycarbonat, PC	Material: Polypropylen, PP	Gewicht: 6,2 g
		Material: BPI PolyEther + PolyEster

Wartung

mVisor 7001 kann so lange angewendet werden, wie das Visier eine einwandfreie Sicht aufweist und nicht beschädigt ist. Stellen Sie durch regelmäßige Kontrolle sicher, dass das Kopfband und die Scheibe keine Risse zeigen.

- Bewahren Sie das Visier bei Nichtgebrauch in der verschlossenen Originalverpackung auf, um die Haltbarkeit zu verlängern
- Das Visier darf nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden
- Bei Beschädigungen oder Rissen muss das Visier ausgetauscht werden

Reinigung

1. Desinfizieren Sie Ihre Hände mit Handdesinfektionsmittel
2. Tragen Sie Schutzhandschuhe
3. Desinfizieren und reinigen Sie das Visier einschließlich des Kopfbandes mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser, alternativ mit Flächendesinfektionsmittel
4. Hängen Sie das Visier auf oder platzieren Sie es so, dass es trocknen kann; alternativ trocknen Sie es mit sterilen Einwegtüchern ab
5. Verwahren Sie das trockene und desinfizierte Visier bis zur Wiederverwendung in einer sauberen Plastiktüte oder in der Originalverpackung auf



Entsorgung/Recycling

Am Ende seiner Lebensdauer demontieren Sie das Visier gemäß Montageanleitung in umgekehrter Reihenfolge. Das Visier und das Kopfband werden gemäß geltender regionaler Regelungen als Hartplastik der Wiederverwertung zugeführt.



Download des Dokuments

mshield.se/docs

Kontakt

mShield | Anders Anderssons väg 12, 285 35 | Markaryd, Schweden | info@mshield.se | +46 433 128 45