



FACE SHIELD

mVISOR7001

Bedienungsanleitung





BEDIENUNGSANLEITUNG

Vorgesehene Anwendung

mVisor 7001 ist ein Schutzvisier, das als Schutz gegen Tropfen und Flüssigkeitsspritzer zugelassen ist. Das Visier wird in Umgebungen angewendet, wo der Anwender Spritzern und/oder Tröpfcheninfektion ausgesetzt ist.

Das Produkt darf nur gemäß dieser Bedienungsanleitung angewendet werden.

Nach der Montage (siehe Vorderseite) von mVisor 7001

DAS VISIER ANZIEHEN Ziehen Sie Einweghandschuhe an. Stellen Sie das Kopfband über dem Kopf und um den Kopf so ein, dass es zur Kopfform passt.

Achtung! Kontrollieren Sie immer, ob mVisor7001 stabil sitzt, bevor Sie zu arbeiten beginnen.

DAS VISIER ABNEHMEN Abnehmen des Visiers ohne Risiko, Hände oder Gesicht zu infizieren: Ziehen Sie Einweghandschuhe an. Nehmen Sie die Schnalle am Hinterkopf, ziehen Sie den Riemen vorsichtig heraus und nehmen Sie das Visier gerade nach vorne ab. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Vorderseite des Visiers. Reinigen Sie das Visier gemäß Anleitung.

Pflege und Reinigung

1. Desinfizieren Sie die Hände mit Händedesinfektionsmittel
2. Ziehen Sie Schutzhandschuhe an
3. Desinfizieren und reinigen Sie das Visier samt Kopfband mit Wasser und Seife, alternativ mit Oberflächendesinfektion.
4. Hängen Sie das Visier auf oder platzieren Sie es so, dass es trocknen kann. Trocknen Sie es alternativ mit einem klinisch reinen Einwegtuch ab.
5. Verwahren Sie das trockene und desinfizierte Visier in einer sauberen Plastiktüte oder in der Originalverpackung auf, bis Sie es wieder verwenden.

Dieses Produkt ist gemäß den Erfordernissen in der Verordnung (EU) 2016/425 hergestellt worden, gemäß den anwendbaren Erfordernissen im Standard EN 166:2001, gemäß dem Zertifikat No. 20/3121/00/0161, ausgefertigt von AITEX, Plaza Emilio Sala No. 1, Alcoi, Spain, Notified Body 0161.

mVisor 7001 kann so lange angewendet werden wie das Visier volle Sicht hat und keine Beschädigungen aufweist. Kontrollieren Sie regelmäßig, dass sich beim Kopfband und der Sichtscheibe keine Risse bilden.

Technische Angaben

Visier	Einstellbares Kopfband	Schaumgummi
Dicke: 1,8 mm	Dicke: 1,2 mm	Dicke: 30 mm
Länge: 219 mm	Breite: 25 mm	Breite: 30 mm
Gewicht: 146 g	Gewicht: 24,2 g	Länge: 200-330 mm
Material : polykarbonat, PC	Material : polypropylen, PP	Gewicht: 6,2 gr
		Material: BPI PolyEther+PolyEster



Dokumentation zum Download

Besuchen Sie: mshield.se/docs

Kontakt

mShield | Anders Anderssons väg 12, 285 35 | Markaryd, Sverige | info@mshield.se | +46 433 128 45